

# Pomůcky pro přemísťování pacientů



**SAMARIT**

## **SAMARIT ROLLBORD**

- STANDARD
- JUNIOR
- ROLLMAT
- MINI-GYN
- SOFT-BED
- Sterilizovatelný
- Ambulanční



## **SAMARIT ROLLOVER**

- EASY
- LONG-GLIDE



## **SAMARIT TRANSLIDE**

- LARGE
- SMALL



# ROLLBORD Rolováním umožňuje přesun pacientů v rovině



Pacienta otočíme na bok, pod tělo zasuneme ROLLBORD a pacienta otočíme zpět



Lehkým tlakem na kyčel a ramena posunujeme pacientem (bez použití síly)




Pacienta otočíme na bok, vysuneme ROLLBORD a pacienta otočíme zpět

• hmotnost pouze 3 kg

- pevný povrch, odolný proti protržení
- propustný pro rentgenové paprsky
- netoxický materiál
- zdravotně nezávadný
- bezpečný a příjemný pro pacienty
- pevná a odolná konstrukce
- lehce čistitelný
- čistitelná ochranná folie z PE
- skládací provedení
- minimální námaha pro personál

Snadné použití

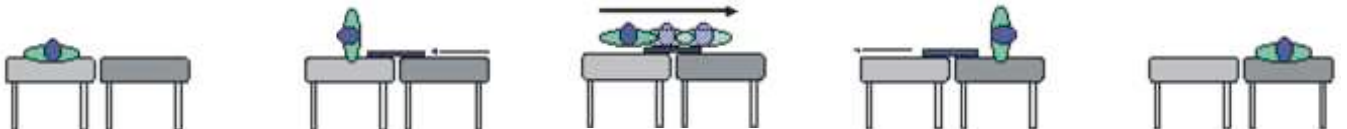

SAMARIT

## STANDARD

skládací



Vhodný pro radiologii,  
operační sály, JIP  
180 x 50 cm

## JUNIOR

skládací



Pro všeobecné použití,  
ošetřovny, geriatrici,  
180 x 50 cm

## ROLLMAT

skládací



Vhodný pro radiologii,  
MRI, všeobecné použití  
180 x 50 cm

## MINI-GYN

neskládací



Vhodný pro gynekologii,  
urologii  
82 x 50 cm

## SOFT-BED

neskládací



Vhodný pro ošetřovny,  
geriatrici  
Zpevněná konstrukce  
180 x 50 cm

## STERILIZOVATELNÝ

skládací



Vhodný pro popáleninová  
centra, speciální operační  
sály, sterilizovatelný povlak  
176 x 50 cm,

## URGENTNÍ PŘÍJEM

skládací



Vhodný pro vozidla  
záchranné služby.  
165 x 40 cm  
Zpevněná konstrukce

## ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

neskládací



Vhodný pro vozidla  
záchranné služby.  
80 x 40 cm  
Zpevněná konstrukce

## TRANSLIDE

přemostění výškových rozdílů




Umožňuje přemostit  
výškové rozdíly do 15 cm.  
170 x 65 cm  
140 x 48 cm

# TRANSLIDE

Umožňuje přemostění výškových rozdílů do 15 cm

- hmotnost pouze 3,5 kg
- tuhá konstrukce
- toxikologicky nezávadný
- chemicky odolný
- antistatické provedení
- kluzný povrch
- radiolucentní
- skladný
- příznivá cena
- výškové přemostění do 15 cm

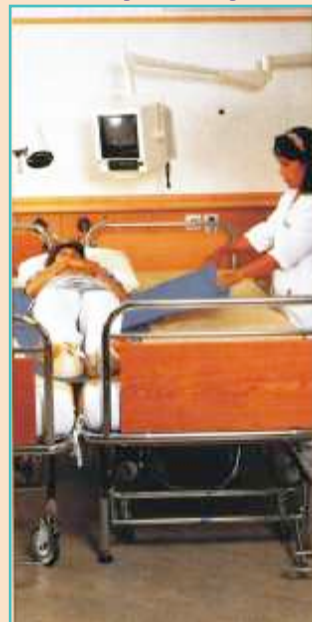

- Pacienta otočíme s prostěradlem na bok, TRANSLIDE vsuneme pod prostěradlo a pacienta otočíme zpět
- Pacienta přesuneme rovnoměrně přes TRANSLIDE na lůžko do požadované polohy
- Lehce pootočíme pacienta na bok a TRANSLIDE opatrně vyjmeme



**Povlak**  
150 x 150 cm  
Nylon

**Rozměry:**  
170 x 65 cm  
140 x 48 cm

**SAMARIT**  
**TRANSLIDE**

## Pomůcky pro rehabilitaci a domácí péči



**PAT - SLING**  
pro přesun



**GLIDEBOARD**  
kluzná deska



**TURNPLATE**  
otočný kotouč



**CARECLIDE**  
podložka k přesunu

**SAMARIT**



Další dotazy Vám rádi sdělíme obratem na Váš telefonický dotaz.